

LÄPÄISEVYYSAJAT EN374-3:2003:N MUKAISESTI (MINUUTTIA)

Käsine :

Profil™ Plus 87-850

	Kemiallinen aine	Breakthrough Time	Protection Index	CAS Number	Viral. kappale	EN-normit
	Asetoni	8	0	67-64-1	Centexbel	374-3:2003
	Asetonitriili	17	1	75-05-8	Centexbel	374-3:2003
	Etyyliasettaatti	5	0	141-78-6	Centexbel	374-3:2003
	Fluorivetyhappo, 48%	> 480	6	7664-39-3	Centexbel	374-3:2003
	Fosforihappo, konsentr,	> 480	6	7664-38-2	Centexbel	374-3:2003
	Hilidisulfidi	< 5	0	75-15-0	Centexbel	374-3:2003
	Kloorivetyhappo, 37%	> 480	6	7647-01-0	Centexbel	374-3:2003
	Kloorivetyhappo, konsestr.	240	4	7647-01-0	Centexbel	374-3:2003
	Metyylialkoholi	30	1	67-56-1	Centexbel	374-3:2003
	Natriumhydroksidi, 50%	> 480	6	1310-73-2	Centexbel	374-3:2003
	Rikkihappo, 95%	> 480	6	7664-93-9	Centexbel	374-3:2003
	Rikkihappo, 96%	225	4	7664-93-9	Centexbel	374-3:2003
	Typpihappo, 70%	242	5	7697-37-2	Centexbel	374-3:2003
	Vetyperoksidi, 30%	> 480	6	7722-84-1	Centexbel	374-3:2003

LÄPÄISEVYYSAJAT EN374-3:2003:N MUKAISESTI (MINUUTTIA)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Ei suositeltu	Roiskesuojaus		Keskitason suojaus		Korkea suojaus	

Yllä olevan taulukon tiedot perustuvat tuloksiin laboratoriotesteissä, jotka on suoritettu käsineen kämmenalueella, tai ne perustuvat laboratoriotestien tuloksista tehtyihin päätelmiin. Testit suoritettiin käyttämällä vakiotestausmetodeja, jotka eivät ehkä riittävästi vastaa loppukäytön erityisiä olosuhteita. Koska Ansellilla ei ole yksityiskohtaisia tietoja loppukäytön olosuhteista tai mahdollisuutta tarkkailla niitä, kaikkia tietoja täytyy pitää vain neuvoo-antavina, ja Ansell kieltäytyy kaikesta vastuusta.

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
 Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.ansell.eu> E-mail info@ansell.eu

